



## **INSTRUÇÕES DE USO**

**NOME TÉCNICO:** Caixa / Estojo para instrumental cirúrgico

**NOME COMERCIAL:** Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

**Fabricante:**

ENGIPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407

**Responsável Técnico:**











Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

**REGISTRO ANVISA Nº 10208610055**

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL  
ESTERILIZAR ANTES DO USO**

## Instrução de Uso

**Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens**

	Código do Produto		Número de Lote
	Data de Fabricação		Ler as Instruções de Uso
	Produto de Uso Único		Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Não Estéril		Evitar exposição direta à luz solar
	Cuidado - Frágil		Manter Protegido de Umidade

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Caixa / Estojo para instrumental cirúrgico

**Nome Comercial:** Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

**Composto por:** Caixas em Polímero

**Matéria Prima:** Polifenilsulfona, Ultem HU1004, Aço Inox, Borracha Vulcanizada, Silicone e Alumínio.

### Produto Não Estéril

**Método de Esterilização:** Autoclave a vapor

#### 1. Descrição do Produto Médico

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são embaladas individualmente em embalagem plástica devidamente rotulada. A embalagem é fabricada em polietileno de baixa densidade.


As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

#### 1.1. Apresentação Comercial


As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan apresentam-se nos seguintes modelos para que o cirurgião faça sua escolha:

Tabela: Apresentação das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

	DESCRIÇÃO	IMAGEM
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.1 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.2 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.1 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.2 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.1 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.2 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.1 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.2 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.3	
110.003XX	CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 001 CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 002 CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 003	

110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 003</p>	
110.003XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 003</p>	
110.003XX	<p>CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 001 CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 002 CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 001 CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 002 CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 001 CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 002 CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 003</p>	
110.00076	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 001 CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 002 CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 003</p>	

INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

110.000XX	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 001 CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 002 CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 001 CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 002 CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 003	
110.000XX	CAIXA POSTPLAN MOD. 001 CAIXA POSTPLAN MOD. 002 CAIXA POSTPLAN MOD. 003	
110.000XX	CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 001 CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 002 CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 003	
110.000XX	CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 001 CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 002 CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 003	
110.000XX	CAIXA ENDOBOTTON MOD. 001 CAIXA ENDOBOTTON MOD. 002 CAIXA ENDOBOTTON MOD. 003	
110.000XX	CAIXA HEBERT MOD. 001 CAIXA HEBERT MOD. 002 CAIXA HEBERT MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 001 CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 002 CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 001 CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 002 CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 001 CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 002 CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 003	


110.00XXX	<p>CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 001</p> <p>CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 002</p> <p>CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 003</p>	

INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN


110.00XXX	<p>CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ DHS MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ DHS MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ DHS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 003</p>	

110.00XXX	<p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 001</p> <p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 002</p> <p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 001</p> <p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 002</p> <p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 001</p> <p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 002</p> <p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 003</p>	




110.00XXX	<p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 003</p>	


110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 003</p>	


110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 003</p>	

INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

110.00XXX	<p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 003</p>	

110.00XXX	<p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 003</p>	
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 003</p>	
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 003</p>	
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 003</p>	

110.110XX	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25	
-----------	--	--

110.110XX	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 1 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 2 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 3 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 4 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 5 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 6 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 7 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 8 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 9 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 10	
110.110XX	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 1 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 2 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 3 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 4 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 5 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 6 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 7 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 8 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 9 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 10	
110.110XX	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4	

	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25	





	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 26</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 27</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 28</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 29</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 30</p>	
<p>110.111XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10</p>	
<p>110.111XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 11</p>	


CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 12  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 13  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 14  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 15  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 16  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 17  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 18  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 19  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 20  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 21  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 22  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 23  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 24  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 25  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 26  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 27  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 28  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 29  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 30  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 31  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 32  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 33  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 34  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 35  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 36  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 37  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 38  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 39  
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 40



	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 41</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 42</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 43</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 44</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 45</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 46</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 47</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 48</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 49</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 50</p>	
<p>110.112XX</p>	<p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 1</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 2</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 3</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 4</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 5</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 6</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 7</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 8</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 9</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 10</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 11</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 12</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 13</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 14</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 15</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 16</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 17</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 18</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 19</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 20</p>	


CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 21  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 22  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 23  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 24  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 25  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 26  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 27  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 28  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 29  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 30  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 31  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 32  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 33  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 34  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 35  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 36  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 37  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 38  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 39  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 40  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 41  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 42  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 43  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 44  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 45  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 46  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 47  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 48  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 49  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 50




110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25</p>	
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 4</p>	

	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 10</p>	
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 10</p>	
110.126XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9</p>	


	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25</p>	
<p>110.126XX</p>	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5</p>	

	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10</p>	
<p>110.12XXX</p>	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 22</p>	



	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 25</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 26</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 27</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 28</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 29</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 30</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 31</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 32</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 33</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 34</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 35</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 36</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 37</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 38</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 39</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 40</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 41</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 42</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 43</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 44</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 45</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 46</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 47</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 48</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 49</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 50</p>	
--	---	--

110.12XXX	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 1 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 2 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 3 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 4 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 5 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 6 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 7 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 8 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 9 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 10 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 11 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 12 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 13 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 14 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 15 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 16 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 17 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 18 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 19 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 20 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 21 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 22 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 23 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 24 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 25 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 26 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 27 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 28 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 29 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 30	
-----------	---	---

	<p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 31</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 32</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 33</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 34</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 35</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 36</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 37</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 38</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 39</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 40</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 41</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 42</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 43</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 44</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 45</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 46</p> <p>AIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 47</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 48</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 49</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 50</p>	
--	--	---

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

A seleção do modelo comercial das caixas é de responsabilidade exclusiva do cirurgião, não cabendo ao Fabricante a responsabilidade por essas escolhas.

## 2. Composição

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan possuem as seguintes matérias-primas: Polifenilsulfona, Ultem HU1004, Aço Inox, Borracha Vulcanizada, Silicone e Alumínio.

### **3. Indicações e Finalidade**

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan foram especialmente projetadas para acomodação de instrumentais e implantes cirúrgicos, nos procedimentos de esterilização, armazenamento e transporte do mesmo. Apresentam extensa superfície perfurada o que proporciona um fluxo maior do agente esterilizante no interior da caixa, acelerando o seu contato com o instrumental e/ou implante, o que resulta em um ciclo de esterilização bem sucedido.

#### **3.1. Contraindicação**

Não se aplica.

### **4. Forma de Apresentação da embalagem**

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são comercializadas **UNITARIAMENTE** em embalagem plástica. As embalagens plásticas são identificadas com uma etiqueta contendo as seguintes informações:

1. Nome Técnico;
2. Nome Comercial;
3. Produto/Dimensões;
4. Código;
5. Quantidade;
6. Fabricação;
7. Lote;
8. Material;
9. Validade;
10. Registro ANVISA: xxxxxxx;
11. Responsável Técnico;
12. Dados do Fabricante;
13. Código de barra.

FABRICANTE: ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407

E os dizeres:

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,  
MANIPULAÇÃO, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS,  
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO “VER INSTRUÇÕES DE USO”.

**Instrução de Uso disponível em: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>  
Para Instruções de Uso no formato impresso o consumidor pode solicitar sem custo adicional  
através do SAC 0800770-7475**

#### **4.1. Cuidados com Manuseio, Armazenamento e Transporte do Produto Médico**

- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz;
- Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referenciais do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos;
- Devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características;
- Devem ser manipulados cuidadosamente evitando-se batidas ou quedas;
- Qualquer caixa que tenha caído ou sido inadequadamente manuseada, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separada e encaminhada ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

#### **4.2 Limpeza**

Os instrumentais devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% +- água destilada 30%. Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

**IMPORTANTE:** Detergentes com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

#### **4.3 Risco de Contaminação**

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan podem apresentar riscos de contaminação e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, as caixas após cada uso devem ser limpas corretamente, a fim de evitar incrustações e corrosões nas caixas. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer as caixas. As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser esterilizadas antes do uso.

#### **4.4 Esterilização**

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são fornecidas não estéreis, devendo ser esterilizadas antes da sua utilização.

Devem ser submetidos à esterilização por calor seco ou úmido antes de ser utilizados.

O método utilizado em autoclave deve ser na temperatura entre 120° C e 140° C.

É de responsabilidade da instituição hospitalar garantir a esterilização conforme regulamentação vigente.

#### **4.5 Descarte**

Quando da necessidade de se descartar as caixas, a mesma deve ser descaracterizada imediatamente de forma a evitar que seja utilizada inadvertidamente, recomendamos que sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização.

O descarte das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Deve a Instituição hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislação vigente aplica.

#### **4.6 Eventos Adversos**

Caso ocorra algum evento adverso relacionado ao produto, deverá ser notificado o fabricante através do telefone (19) 3522 7407 e notificar o órgão sanitário competente, acessando o site da ANVISA – [www.anvisa.gov.br/notivisa](http://www.anvisa.gov.br/notivisa).

### **5 Precauções e Advertências**


- Esterilizar o produto antes do uso;
- Em caso de queda ou acidente que comprometa as características do produto, o mesmo não deverá ser utilizado;
- Nunca utilize caixas danificadas;
- Antes de utilizar as caixas, siga as instruções de limpeza, descontaminação e esterilização;
- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser mantidas em suas embalagens originais até a sua limpeza, descontaminação, esterilização e uso;
- Após cada uso, realizar uma limpeza correta;
- Verificar a cada uso, se as Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan não sofreram nenhum dano;
- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan somente devem ser usadas para a finalidade que foram desenvolvidas, não utilize-as para outros fins diferentes daqueles descritos.

## 5.1 Rastreabilidade

A rastreabilidade das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan é garantida através de marcação a laser do logo do fabricante (Engimplan), número do código e do número de lote no produto. Também segue na embalagem etiqueta de rastreabilidade contendo os seguintes dados:

- Código do produto.
- Descrição do produto.
- Nome Técnico.
- Nome Comercial.
- Número do lote.
- Número de registro na ANVISA.
- Identificação do fabricante.
- Identificação do responsável técnico.

Figura: Modelo de etiqueta de rastreabilidade (Imagem Ilustrativa)

<b>REF</b>	<b>LOT</b>	<b>engimplan...</b>
Nome comercial: <small>Commercial Name</small>		
Nome Técnico: <small>Technical Name</small>		Código de Barra interno:
Registro ANVISA nº: 1020861.###-### <small>ANVISA Register #1020861##</small>		
 <b>ENGIMPLAN-ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.</b> Rod. Washington Luiz S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – CEP- 13501-600 Rio Claro / SP CNPJ-07.710.244/0001-39 Fone: (19) 3522-7407 Autorização de Funcionamento de Empresas: 1020861 Responsável Técnico Eng.ª Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5082868861 <b>INDÚSTRIA BRASILEIRA</b>		

## 5.2 Reclamação

Caso o produto apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Engimplan. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP: 13501-600.

A Engimplan disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (19) 3522 7407 para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Engimplan Engenharia de Implante Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

Telefone: (19) 3522 7407

**Responsável Técnico:** Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Eng.º José Tadeu Leme**  
Responsável Legal  
CREA-SP 141.617/D

---

**Engº Rosana Maria Moreira Santos**  
Responsável Técnico.  
CREA-SP 5062668661