



INSTRUÇÕES DE USO

NOME TÉCNICO: Caixa / Estojo para instrumental cirúrgico

NOME COMERCIAL: Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

Fabricante:

ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407












Responsável Técnico:

Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

REGISTRO ANVISA Nº 10208610055

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL
ESTERILIZAR ANTES DO USO**

LEGENDA DOS SÍMBOLOS DA EMBALAGEM

	Código do produto		Evitar exposição direta à luz solar
	Número de lote		Manter protegido de umidade
	Consulte as instruções de uso		Cuidado - Frágil
	Não Estéril		Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Data de fabricação		Data de validade
	Nome do fabricante		

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Caixa / Estojo para instrumental cirúrgico

Nome Comercial: Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

Composto por: Caixas em Polímero

Matéria Prima: Polifenilsulfona, Ultem HU1004, Aço Inox, Borracha Vulcanizada, Silicone e Alumínio.

Produto Não Estéril

Método de Esterilização: Autoclave a vapor

1. Descrição do Produto Médico


As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são embaladas individualmente em embalagem plástica devidamente rotulada. A embalagem é fabricada em polietileno de baixa densidade.


As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

1.1. Apresentação Comercial

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan apresentam-se nos seguintes modelos para que o cirurgião faça sua escolha:

Tabela: Apresentação das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

	DESCRIÇÃO	IMAGEM
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.1 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.2 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.1 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.2 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.1 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.2 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.1 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.2 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.3	
110.003XX	CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 001 CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 002 CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 003	


110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 003</p>	
110.003XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 003</p>	
110.003XX	<p>CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 001 CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 002 CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 001 CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 002 CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 003</p>	

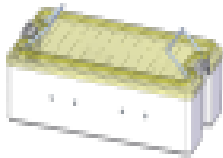
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 003</p>
110.00076	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA POSTPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA POSTPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA POSTPLAN MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA ENDOBOTTON MOD. 001</p> <p>CAIXA ENDOBOTTON MOD. 002</p> <p>CAIXA ENDOBOTTON MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA HEBERT MOD. 001</p> <p>CAIXA HEBERT MOD. 002</p> <p>CAIXA HEBERT MOD. 003</p>



110.000XX	<p>CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 001</p> <p>CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 002</p> <p>CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 002</p>	


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

	CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 001 CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 002 CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 001 CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 002 CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 001 CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 002 CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 001 CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 002 CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 001 CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 002 CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA P/ DHS MOD. 001 CAIXA P/ DHS MOD. 002 CAIXA P/ DHS MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 001 CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 002 CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 003	

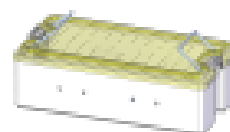
110.00XXX	<p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 001</p> <p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 002</p> <p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 003</p>	


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

110.00XXX	<p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 001</p> <p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 002</p> <p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 001</p> <p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 002</p> <p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 003</p>	

110.00XXX	<p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR</p>	

	POSTERIOR MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001 CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002 CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001 CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002 CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001 CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002 CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001 CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002 CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003





110.00XXX	<p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 001 CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 002 CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 001 CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 002 CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 001 CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 002 CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 001 CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 002 CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 001 CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 002 CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 001 CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 002 CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 001 CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 002 CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 001 CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 002 CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 001 CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 002 CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 003</p>	

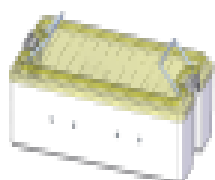
INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

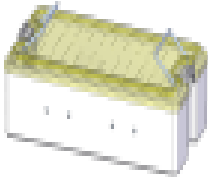
110.00XXX	<p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 003</p>
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 003</p>
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 003</p>
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002</p>



	ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 001 CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 002 CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 003	
110.00XXX	CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 001 CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 002 CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 003	
110.110XX	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19 CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20	

<p>110.110XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 10</p>	
<p>110.110XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 10</p>	

110.110XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21</p>	
-----------	---	---

	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 26</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 27</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 28</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 29</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 30</p>	
<p>110.111XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10</p>	
<p>110.111XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 6</p>	

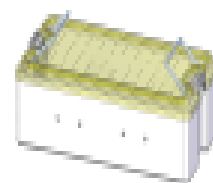
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 7
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 8
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 9
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 10
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 11

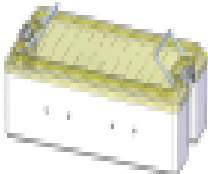
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 12
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 13
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 14
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 15
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 16
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 17
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 18
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 19
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 20
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 21
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 22
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 23
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 24
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 25
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 26
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 27
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 28
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 29
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 30
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 31
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 32
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 33
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 34
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 35

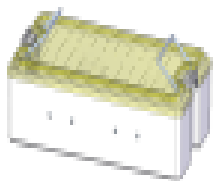


	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 36</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 37</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 38</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 39</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 40</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 41</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 42</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 43</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 44</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 45</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 46</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 47</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 48</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 49</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 50</p>	
110.112XX	<p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 1</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 2</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 3</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 4</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 5</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 6</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 7</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 8</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 9</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 10</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 11</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 12</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 13</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 14</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 15</p>	

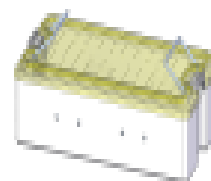
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 16
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 17
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 18
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 19
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 20
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 21
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 22
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 23
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 24
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 25
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 26
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 27
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 28
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 29
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 30
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 31
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 32
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 33
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 34
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 35
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 36
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 37
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 38
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 39
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 40
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 41
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 42
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 43
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 44
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 45

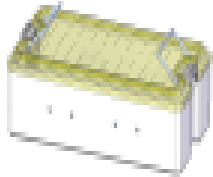


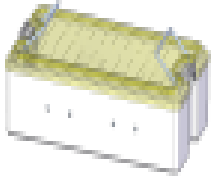
	<p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 46</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 47</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 48</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 49</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 50</p>	
<p>110.125XX</p>	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25</p>	

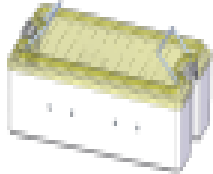
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 10</p>	
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 10</p>	
110.126XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5</p>	

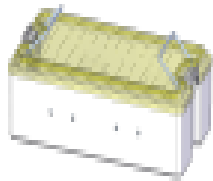
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24	
CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25	

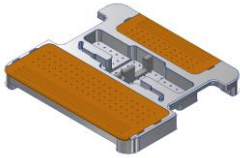
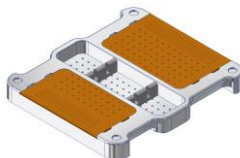
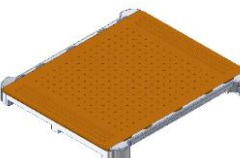


<p>110.126XX</p>	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10</p>	
<p>110.12XXX</p>	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 16</p>	

	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 25</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 26</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 27</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 28</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 29</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 30</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 31</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 32</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 33</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 34</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 35</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 36</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 37</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 38</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 39</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 40</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 41</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 42</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 43</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 44</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 45</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 46</p>	
--	---	---

	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 47</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 48</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 49</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 50</p>	
<p>110.12XXX</p>	<p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 1</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 2</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 3</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 4</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 5</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 6</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 7</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 8</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 9</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 10</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 11</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 12</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 13</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 14</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 15</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 16</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 17</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 18</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 19</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 20</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 21</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 22</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 23</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 24</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 25</p>	

	<p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 26</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 27</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 28</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 29</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 30</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 31</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 32</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 33</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 34</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 35</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 36</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 37</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 38</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 39</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 40</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 41</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 42</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 43</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 44</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 45</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 46</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 47</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 48</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 49</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 50</p>	
--	---	---

112.00030	ESTOJO PARA BUCOMAXILO MOD.01	
112.00031	ESTOJO PARA BUCOMAXILO MOD.02	
112.00032	ESTOJO PARA BUCOMAXILO MOD.03	

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

A seleção do modelo comercial das caixas é de responsabilidade exclusiva do cirurgião, não cabendo ao Fabricante a responsabilidade por essas escolhas.

2. Composição

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan possuem as seguintes matérias-primas: Polifenilsulfona, Ultem HU1004, Aço Inox, Borracha Vulcanizada, Silicone e Alumínio.

3. Indicações e Finalidade

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan foram especialmente projetadas para acomodação de instrumentais e implantes cirúrgicos, nos procedimentos de esterilização, armazenamento e transporte do mesmo. Apresentam extensa superfície perfurada o que proporciona um fluxo maior do agente esterilizante no interior da caixa, acelerando o seu contato com o instrumental e/ou implante, o que resulta em um ciclo de esterilização bem sucedido.

3.1. Contraindicação

Não se aplica.

4. Forma de Apresentação da embalagem

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são comercializadas **UNITARIAMENTE** em embalagem plástica. As embalagens plásticas são identificadas com uma etiqueta contendo as seguintes informações:

1. Nome Técnico;
2. Nome Comercial;
3. Produto/Dimensões;
4. Código;
5. Quantidade;
6. Fabricação;
7. Lote;
8. Material;
9. Validade;
10. Registro ANVISA: xxxxxxx;
11. Responsável Técnico;
12. Dados do Fabricante;
13. Código de barra.

FABRICANTE: ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407

E os dizeres:

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO


CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,
MANIPULAÇÃO, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS,
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO “VER INSTRUÇÕES DE USO”.

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direto de calor, umidade ou luz excessiva.

Instrução de Uso disponível em: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

Para Instruções de Uso no formato impresso o consumidor pode solicitar sem custo adicional,
inclusive de envio, através do SAC 0800770-7475



“Para acesso a versão correta das instruções de Uso, seguir orientação do impresso
ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO que consta dentro da embalagem”

 **engimplan**

ENGIPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.
Rod. Washington Luiz, Km 172, Pista Sul, S/N, Condomínio Conpark Rua 6 – Jardim
Anhanguera – CEP: 13501-600 – Rio Claro - SP
CNPJ: 67.710.244/0001-39 – SAC: 0800770-7475
Responsável Técnico: Eng. Rosana Maria Moreira Santos CREA-SP 5062668661


REF XXXXXXX **LOT** XXXXXX **Quantidade:** XX


Modelo Comercial:
Modelo Comercial:
Commercial Model:
Registro Anvise: 102086100XX **Revisão Instrução de Uso:** XX
Nome Técnico:
Nome Comercial:
Matéria-Prima:

 XX/XX/XXXX  XX/XX/XXXX

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO
“CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO: VIDE INSTRUÇÕES DE USO”
Instrução de Uso disponível em / Instrucción de Uso disponible en / Instruction for Use available at: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>
“Para acesso a versão correta das Instruções de Uso, seguir orientação do impresso ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO que consta dentro da embalagem.”





4.1. Cuidados com Manuseio, Armazenamento e Transporte do Produto Médico

- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz;
- Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referenciais do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos;
- Devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características;
- Devem ser manipulados cuidadosamente evitando-se batidas ou quedas;
- Qualquer caixa que tenha caído ou sido inadequadamente manuseada, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separada e encaminhada ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

4.2 Limpeza

Os instrumentais devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% +- água destilada 30%. Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

IMPORTANTE: Detergentes com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

4.3 Risco de Contaminação

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan podem apresentar riscos de contaminação e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, as caixas após cada uso devem ser limpas corretamente, a fim de evitar incrustações e corrosões nas caixas. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer as caixas. As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser esterilizadas antes do uso.

4.4 Esterilização

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são fornecidas não estéreis, devendo ser esterilizadas antes da sua utilização.

Devem ser submetidos à esterilização por calor seco ou úmido antes de ser utilizados.

O método utilizado em autoclave deve ser na temperatura entre 120° C e 140° C.

É de responsabilidade da instituição hospitalar garantir a esterilização conforme regulamentação vigente.

4.5 Descarte

Quando da necessidade de se descartar as caixas, a mesma deve ser descaracterizada imediatamente de forma a evitar que seja utilizada inadvertidamente, recomendamos que sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização.

O descarte das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Deve a Instituição hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislação vigente aplica.

4.6 Eventos Adversos

Caso ocorra algum evento adverso relacionado ao produto, deverá ser notificado o fabricante através do telefone (19) 3522 7407 e notificar o órgão sanitário competente, acessando o site da ANVISA – www.anvisa.gov.br/notivisa.

5 Precauções e Advertências

- Esterilizar o produto antes do uso;
- Em caso de queda ou acidente que comprometa as características do produto, o mesmo não deverá ser utilizado;
- Nunca utilize caixas danificadas;
- Antes de utilizar as caixas, siga as instruções de limpeza, descontaminação e esterilização;
- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser mantidas em suas embalagens originais até a sua limpeza, descontaminação, esterilização e uso;
- Após cada uso, realizar uma limpeza correta;
- Verificar a cada uso, se as Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan não sofreram nenhum dano;
- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan somente devem ser usadas para a finalidade que foram desenvolvidas, não utilize-as para outros fins diferentes daqueles descritos.

5.1 Rastreabilidade

A rastreabilidade das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan é garantida através de marcação a laser do logo do fabricante (Engimplan), número do código e do número de lote no produto

5.2 ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso

Modelo de alerta de instrução de uso (Imagem Ilustrativa)



5.3 Reclamação

Caso o produto apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Engimplan. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP: 13501-600.

A Engimplan disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (19) 3522 7407 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Engimplan Engenharia de Implante Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

Telefone: (19) 3522 7407

Responsável Técnico: Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Bruno de Castro Ferreira Barreto
Representante Legal

Eng.^a Rosana Maria Moreira Santos
Responsável Técnico
CREA-SP 5062668661