



INSTRUÇÕES DE USO

NOME TÉCNICO: Não Aplicável

NOME COMERCIAL: Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan

Fabricante:

ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407



Responsável Técnico:

Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

REGISTRO ANVISA Nº Não Aplicável

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL
ESTERILIZAR ANTES DO USO**

LEGENDA DOS SÍMBOLOS DA EMBALAGEM

	Código do produto		Evitar exposição direta à luz solar
	Número de lote		Manter protegido de umidade
	Atenção – Consulte Instruções de Uso		Cuidado - Frágil
	Não Estéril		Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Data de fabricação		Data de validade
	Nome do fabricante		

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Caixa / Estojo para instrumental cirúrgico

Nome Comercial: Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan

Composto por: Caixas em Alumínio

Matéria Prima: Aço Inox, Alumínio, Silicone e Borracha Vulcanizada.

Produto Não Estéril

Método de Esterilização: Autoclave a vapor

1. Descrição do Produto Médico

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan são embaladas individualmente em embalagem plástica devidamente rotulada. A embalagem é fabricada em polietileno de baixa densidade (PEBD).

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

1.1. Apresentação Comercial


As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan apresentam-se em vários modelos para que o cirurgião faça sua escolha:

Tabela: Apresentação das Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan

	DESCRIÇÃO	IMAGEM
110.00215	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001	
110.00216	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001	
110.00217	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002	
110.00218	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002	
110.00219	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL	
110.00355	CAIXA KIT ORTODÔNTICO	
110.00220	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR	
110.00221	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO	
110.00222	CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL	
110.00356	CAIXA KIT PROTÉTICO	
110.00357	CAIXA PARA CONJUNTO ATML	
110.00223	CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR	
110.00224	CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA	
110.00225	CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR	
110.00358	CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8	
110.00359	CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6	
110.00360	CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1	


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.00361	CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5
110.00226	CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM
110.00227	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM
110.00228	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS
110.00229	CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS
110.00230	CAIXA POSTPLAN
110.00231	CAIXA SISTEMA ZARGON
110.00232	CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS
110.00233	CAIXA ENDOBOTTON
110.00234	CAIXA HEBERT
110.00235	CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP
110.00236	CAIXA PARA CONJUNTO DE FECHAMENTO DE CRÂNIO
110.00237	CAIXA PARA PLACA PUNHO
110.00238	CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS
110.00239	CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS
110.00240	CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS
110.00241	CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA
110.00242	CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA
110.00243	CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL
110.00244	CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL
110.00245	CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA
110.00246	CAIXA P/ ANCORA ARPÃO
110.00247	CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU
110.00248	CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5
110.00249	CAIXA P/ CONDIPLAN
110.00250	CAIXA P/ DHS
110.00251	CAIXA P/ FIXADOR DINART 200
110.00252	CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR

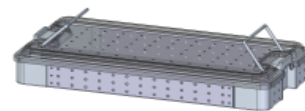


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.00253	CAIXA P/ PEDICULAR
110.00254	CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA
110.00255	CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES
110.00256	CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL
110.00257	CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA
110.00258	CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR
110.00259	CAIXA SPINE SCREW CERVICAL
110.00260	CAIXA SPINE SCREW LOMBAR
110.00261	CAIXA INTER ESPINHOSO
110.00262	CAIXA KIT ENXERTO
110.00263	CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA
110.00264	CAIXA PARA HASTE DE TIBIA
110.00265	CAIXA PARA CONDIPLAN
110.00266	CAIXA PARA FIXADOR
110.00267	CAIXA PARA PLIF - EN
110.00268	CAIXA PARA CAN CORTICAL
110.00269	CAIXA PARA CONJUNTO DE FECHAMENTO DE CRÂNIO – SISTEMA 2,0
110.00270	CAIXA P/ SISTEMA PUNHO
110.10364	CAIXA ALUMÍNIO P/ SIST. 1,5 BUCOPLAN E2005
110.10365	CAIXA ALUMÍNIO P/ SIST. 2,0 BUCOPLAN E2005
110.10366	CAIXA ALUMÍNIO P/ SIST. 2,4 BUCOPLAN E2005
110.10367	CAIXA ALUMÍNIO P/ SIST. 1,5 / 2,0 / 2,4 BUCOPLAN
110.00328	CAIXA 560 X 290 X 60 MM
110.00329	CAIXA 270 X 270 MM.
110.00330	CAIXA 450 X 260 X 60 MM
110.00331	CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM
110.00332	CAIXA 60 X 360 X 360 MM

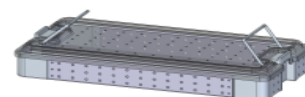


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.00333	CAIXA 60 X 290 X 590 MM
110.00334	CAIXA 60 X 270 X 480 MM
110.00335	CAIXA 60 X 270 X 310 MM
110.00336	CAIXA 170 X 265 X 550 MM
110.00414	CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO
110.00415	CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO
110.00337	CAIXA 120 X 265 X 550 MM
110.00338	CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES
110.00339	CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES
110.00362	CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR
110.00340	CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES
110.00363	CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA
110.00341	CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES
110.00364	CAIXA P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL
110.00365	CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO
110.00366	CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0
110.00367	CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4
110.00409	CAIXA SISTEMA BUCOPLAN
110.10400	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1
110.10401	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2
110.10402	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3
110.10403	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4
110.10404	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5
110.10405	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6
110.10406	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7
110.10407	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8

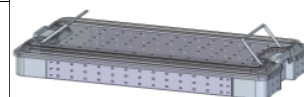


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.10408	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9
110.10409	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10
110.10410	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11
110.10411	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12
110.10412	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13
110.10413	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14
110.10414	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15
110.10415	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16
110.10416	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17
110.10417	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18
110.10418	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19
110.10419	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20
110.10420	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21
110.10421	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22
110.10422	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23
110.10423	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24
110.10424	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25
110.10450	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 1
110.10451	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 2
110.10452	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 3
110.10453	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 4
110.10454	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 5
110.10455	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 6
110.10456	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 7
110.10457	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 8

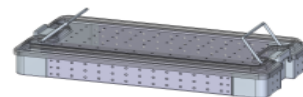


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.10458	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 9
110.10459	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 10
110.10470	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 1
110.10471	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 2
110.10472	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 3
110.10473	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 4
110.10474	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 5
110.10475	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 6
110.10476	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 7
110.10477	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 8
110.10478	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 9
110.10479	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 10
110.10480	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 11
110.10481	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 12
110.10482	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 13
110.10483	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 14
110.10484	CAIXAS PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 15
110.10500	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1
110.10501	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2
110.10502	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3
110.10503	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4
110.10504	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5
110.10505	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6
110.10506	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7
110.10507	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8
110.10508	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9

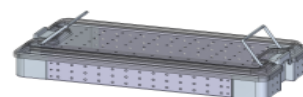


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.10509	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10
110.10510	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11
110.10511	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12
110.10512	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13
110.10513	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14
110.10514	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15
110.10515	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16
110.10516	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17
110.10517	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18
110.10518	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19
110.10519	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20
110.10520	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21
110.10521	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22
110.10522	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23
110.10523	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24
110.10524	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25
110.10550	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1
110.10551	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2
110.10552	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3
110.10553	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4
110.10554	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5
110.10555	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6
110.10556	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7
110.10557	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8
110.10558	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9
110.10559	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10

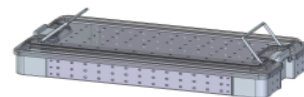


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.10570	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 1
110.10571	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 2
110.10572	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 3
110.10573	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 4
110.10574	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 5
110.10575	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 6
110.10576	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 7
110.10577	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 8
110.10578	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 9
110.10579	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 10
110.10580	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 11
110.10581	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 12
110.10582	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 13
110.10583	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 14
110.10584	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 15
110.10585	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 16
110.10586	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 17
110.10587	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 18
110.10588	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 19
110.10589	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 20
110.10590	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 21
110.10591	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 22
110.10592	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 23
110.10593	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 24
110.10594	CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 25
110.10670	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 1
110.10671	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 2

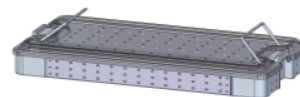


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.10672	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 3
110.10673	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 4
110.10674	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 5
110.10675	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 6
110.10676	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 7
110.10677	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 8
110.10678	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 9
110.10679	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 10
110.10680	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 11
110.10681	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 12
110.10682	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 13
110.10683	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 14
110.10684	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 15
110.10685	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 16
110.10686	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 17
110.10687	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 18
110.10688	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 19
110.10689	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 20
110.10690	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 21
110.10691	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 22
110.10692	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 23
110.10693	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 24
110.10694	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 25
110.10695	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 26
110.10696	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 27
110.10697	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 28
110.10698	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 29
110.10699	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 30

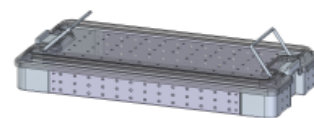


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.10700	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 31
110.10701	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 32
110.10702	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 33
110.10703	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 34
110.10704	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 35
110.10705	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 36
110.10706	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 37
110.10707	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 38
110.10708	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 39
110.10709	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 40
110.10710	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 41
110.10711	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 42
110.10712	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 43
110.10713	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 44
110.10714	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 45
110.10715	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 46
110.10716	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 47
110.10717	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 48
110.10718	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 49
110.10719	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 50
110.12000	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1
110.12001	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2
110.12002	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3
110.12003	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4
110.12004	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5
110.12005	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6

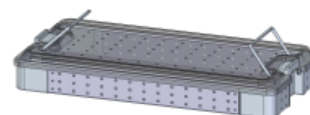


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.12006	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7
110.12007	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8
110.12008	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9
110.12009	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10
110.12010	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11
110.12011	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12
110.12012	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13
110.12013	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14
110.12014	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15
110.12015	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16
110.12016	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17
110.12017	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18
110.12018	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19
110.12019	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20
110.12020	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21
110.12021	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22
110.12022	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23
110.12023	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24
110.12024	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25
110.12050	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 1
110.12051	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 2
110.12052	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 3
110.12053	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 4
110.12054	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 5

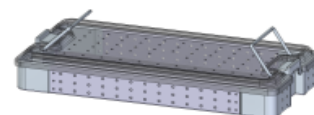


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.12055	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 6
110.12056	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 7
110.12057	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 8
110.12058	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 9
110.12059	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 10
110.12070	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 1
110.12071	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 2
110.12072	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 3
110.12073	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 4
110.12074	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 5
110.12075	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 6
110.12076	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 7
110.12077	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 8
110.12078	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 9
110.12079	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 10
110.12100	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1
110.12101	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2
110.12102	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3
110.12103	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4
110.12104	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5
110.12105	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6
110.12106	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7
110.12107	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8
110.12108	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9

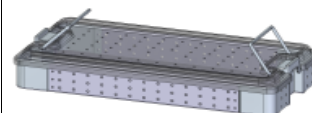


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.12109	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10
110.12110	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11;
110.12111	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12
110.12112	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13
110.12113	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14
110.12114	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15
110.12115	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16
110.12116	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17
110.12117	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18
110.12118	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19
110.12119	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20
110.12120	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21
110.12121	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22
110.12122	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23
110.12123	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24
110.12124	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25
110.12150	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1
110.12151	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2
110.12152	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3
110.12153	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4
110.12154	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5
110.12155	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6
110.12156	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7
110.12157	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8

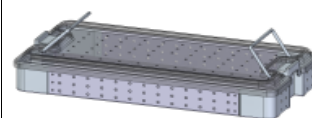


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.12158	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9
110.12159	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10
110.12170	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 1
110.12171	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 2
110.12172	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 3
110.12173	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 4
110.12174	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 5
110.12175	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 6
110.12176	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 7
110.12177	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 8
110.12178	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 9
110.12179	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 10
110.12180	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 11
110.12181	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 12
110.12182	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 13
110.12183	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 14
110.12184	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 15
110.12185	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 16
110.12186	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 17
110.12187	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 18
110.12188	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 19
110.12189	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 20
110.12190	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 21
110.12191	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 22
110.12192	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 23
110.12193	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 24

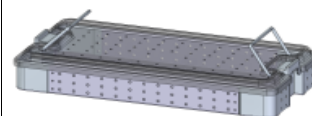


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.12194	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 25
110.12195	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 26
110.12196	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 27
110.12197	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 28
110.12198	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 29
110.12199	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 30
110.12200	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 31
110.12201	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 32
110.12202	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 33
110.12203	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 34
110.12204	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 35
110.12205	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 36
110.12206	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 37
110.12207	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 38
110.12208	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 39
110.12209	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 40
110.12210	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 41
110.12211	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 42
110.12212	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 43
110.12213	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 44
110.12214	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 45
110.12215	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 46
110.12216	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 47
110.12217	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 48
110.12218	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 49
110.12219	CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 50

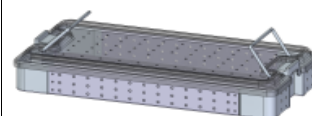


INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN




110.12270	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 1
110.12271	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 2
110.12272	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 3
110.12273	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 4
110.12274	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 5
110.12275	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 6
110.12276	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 7
110.12277	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 8
110.12278	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 9
110.12279	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 10
110.12280	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 11
110.12281	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 12
110.12282	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 13
110.12283	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 14
110.12284	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 15
110.12285	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 16
110.12286	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 17
110.12287	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 18
110.12288	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 19
110.12289	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 20
110.12290	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 21
110.12291	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 22
110.12292	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 23
110.12293	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 24
110.12294	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 25
110.12295	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 26

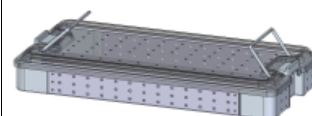

INSTRUÇÃO DE USO
CAIXAS CIRURGICAS EM ALUMÍNIO ENGIMPLAN

110.12296	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 27
110.12297	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 28
110.12298	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 29
110.12299	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 30
110.12300	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 31
110.12301	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 32
110.12302	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 33
110.12303	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 34
110.12304	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 35
110.12305	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 36
110.12306	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 37
110.12307	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 38
110.12308	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 39
110.12309	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 40
110.12310	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 41
110.12311	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 42
110.12312	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 43
110.12313	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 44
110.12314	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 45
110.12315	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 46
110.12316	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 47
110.12317	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 48
110.12318	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 49
110.12319	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 50.
110.19010	CAIXA 01 PARA INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL
110.19020	CAIXA 02 PARA INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL

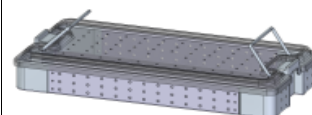

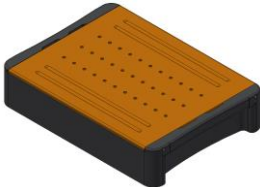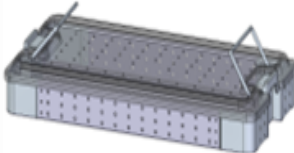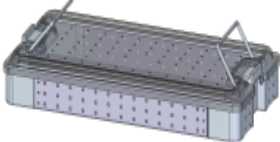110.19030	CAIXA 03 PARA INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL	
110.19110	CAIXA 01 PARA IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL	
110.19120	CAIXA 02 PARA IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL	
110.10300	ESTOJO PARA FIXAÇÃO DE ENXERTO	
110.21001	CAIXA 01 PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA R3	
110.21002	CAIXA 02 PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA R3	
110.21003	CAIXA 03 PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA R3	
110.21004	CAIXA 04 PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA R3	
110.21005	CAIXA 05 PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA R3	
110.21101	CAIXA 01 PARA IMPLANTES SISTEMA R3	
110.21102	CAIXA 02 PARA IMPLANTES SISTEMA R3	

110.21103	CAIXA 03 PARA IMPLANTES SISTEMA R3	
110.21104	CAIXA 04 PARA IMPLANTES SISTEMA R3	
110.21105	CAIXA 05 PARA IMPLANTES SISTEMA R3	
110.51100	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE EM TITANIO MOD.001	
110.51101	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE EM TITANIO MOD.002	
110.51102	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE EM TITANIO MOD.003	
110.51103	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE EM TITANIO MOD.004	
110.51104	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE EM TITANIO MOD.005	
110.51105	CAIXA PARA CONJUNTO ESTERNO	
112.00018	ESTOJO PARA PLACA S	

110.00500	CAIXA BUCOMAXILO 1,5 / 2,0 / 2,4	
112.00033	ESTOJO PARA DISTRATOR PALATAL MOD.01	
112.00034	ESTOJO PARA DISTRATOR PALATAL MOD.02	
112.00035	ESTOJO PARA DISTRATOR PALATAL MOD.03	

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

A seleção do modelo comercial das caixas é de responsabilidade exclusiva do cirurgião, não cabendo ao Fabricante a responsabilidade por essas escolhas.

2. Composição

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan possuem as seguintes matérias-primas: Aço Inox, Alumínio, Silicone e Borracha Vulcanizada.

3. Indicações e Finalidade

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan foram especialmente projetadas para acomodação de instrumentais e implantes cirúrgicos, nos procedimentos de esterilização, armazenamento e transporte do mesmo. Apresentam extensa superfície perfurada o que proporciona um fluxo

maior do agente esterilizante no interior da caixa, acelerando o seu contato com o instrumental e/ou implante, o que resulta em um ciclo de esterilização bem sucedido.

3.1. Contraindicação

Não se aplica.

4. Forma de Apresentação da embalagem

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan são comercializadas **UNITARIAMENTE** em embalagem plástica. As embalagens plásticas são identificadas com uma etiqueta contendo as seguintes informações:

1. Nome Técnico: Não Aplicável
2. Nome Comercial;
3. Produto/Dimensões;
4. Código;
5. Quantidade;
6. Fabricação;
7. Lote;
8. Material;
9. Validade;
10. Registro ANVISA: Não Aplicável
11. Revisão Instrução de Uso;
12. Produto Dispensado de Registro junto a Anvisa conforme Nota Técnica Anvisa Nº218/20
13. Responsável Técnico;
14. Dados do Fabricante;
15. Código de barra.

FABRICANTE: ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407

E os dizeres:

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,
MANIPULAÇÃO, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS,
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO “VER INSTRUÇÕES DE USO”.

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direto de calor, umidade ou luz excessiva.

Instrução de Uso disponível em: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

Para Instruções de Uso no formato impresso o consumidor pode solicitar sem custo adicional,
inclusive de envio, através do SAC 0800770-7475

“Para acesso a versão correta das instruções de Uso, seguir orientação do impresso
ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO que consta dentro da embalagem”

engimplan
ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.
Rod. Washington Luiz, Km 172, Pista Sul, S/N, Condomínio Conpark Rua 6 – Jardim Anhanguers – CEP: 13501-600 – Rio Claro - SP
CNPJ: 67.710.244/0001-39 – SAC: 0800770-7475
Responsável Técnico: Eng. Rosana Maria Moreira Santos CREA-SP 5062668661

REF XXXXXX **LOT** XXXXXX Quantidade: XX

Modelo Comercial:
Modelo Comercial:
Commercial Model:

Registro Anvisa: Não Aplicável
Produto dispensado de registro junto a Anvisa conforme Nota Técnica Anvisa Nº218/20.
Revisão Instrução de Uso: XX
Nome Técnico: Não Aplicável
Nome Comercial:
Matéria-Prima:

XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO

“CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO: VIDE INSTRUÇÕES DE USO”
Instrução de Uso disponível em / Instrucción de Uso disponible en / Instruction for Use available at: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

“Para acesso a versão correta das instruções de Uso, seguir orientação do impresso ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO que consta dentro da embalagem.”

4.1. Cuidados com Manuseio, Armazenamento e Transporte do Produto Médico

- As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engiplan devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz;
- Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referenciais do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos;
- Devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características;
- Devem ser manipulados cuidadosamente evitando-se batidas ou quedas;
- Qualquer caixa que tenha caído ou sido inadequadamente manuseada, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separada e encaminhada ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

4.2 Limpeza

Os instrumentais devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% +- água destilada 30%. Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

IMPORTANTE: Detergentes com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

4.3 Risco de Contaminação

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engiplan podem apresentar riscos de contaminação e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, as caixas após cada uso devem ser limpas corretamente, a fim de evitar incrustações e corrosões nas caixas. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer as caixas. As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engiplan devem ser esterilizadas antes do uso.

4.4 Esterilização

As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engiplan são fornecidas não estéreis, devendo ser esterilizadas antes da sua utilização.

Devem ser submetidos à esterilização por calor seco ou úmido antes de ser utilizados.

O método utilizado em autoclave deve ser na temperatura entre 120° C e 140° C.

É de responsabilidade da instituição hospitalar garantir a esterilização conforme regulamentação vigente.

4.5 Descarte

Quando da necessidade de se descartar as caixas, a mesma deve ser descaracterizada imediatamente de forma a evitar que seja utilizada inadvertidamente, recomendamos que sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização.

O descarte das Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Deve a Instituição hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislação vigente aplica.

4.6 Eventos Adversos

Caso ocorra algum evento adverso relacionado ao produto, deverá ser notificado o fabricante através do telefone (19) 3522 7407 e notificar o órgão sanitário competente, acessando o site da ANVISA – www.anvisa.gov.br/notivisa.

5 Precauções e Advertências

- Esterilizar o produto antes do uso;
- Em caso de queda ou acidente que comprometa as características do produto, o mesmo não deverá ser utilizado;
- Nunca utilize caixas danificadas;
- Antes de utilizar as caixas, siga as instruções de limpeza, descontaminação e esterilização;
- As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan devem ser mantidas em suas embalagens originais até a sua limpeza, descontaminação, esterilização e uso;
- Após cada uso, realizar uma limpeza correta;
- Verificar a cada uso, se as Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan não sofreram nenhum dano;
- As Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan somente devem ser usadas para a finalidade que foram desenvolvidas, não utilize-as para outros fins diferentes daqueles descritos.

5.1 Rastreabilidade

A rastreabilidade das Caixas Cirúrgicas em Alumínio Engimplan é garantida através de marcação a laser do logo do fabricante (Engimplan), número do código e do número de lote no produto.

5.2 ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

Modelo de alerta de instrução de uso (Imagem Ilustrativa)



ALERTA - INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Instrução Normativa da ANVISA de nº 04, de 19 de junho de 2012, que estabeleça regras para disponibilização de Instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das **Instruções de Uso** no site do fabricante do produto.

As **Instruções de Uso** apresentam informações técnicas, claras e detalhadas sobre as características do produto, precauções e advertências, contraindicações, instruções para o uso e os tamanhos/modelos disponíveis para comercialização.

As **Instruções de Uso** para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.engimplan.com.br

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Reader.

As **Instruções de Uso** estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL, DATA e a REVISÃO da instrução, informados no rótulo do produto adquirido.

Todas as **Instruções de Uso** possuem a identificação e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão) da **Instrução de Uso** informada no rótulo do produto.

Para **Instruções de Uso** no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do SAC 0800770-7475.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
SAC: 0800770-7475
E-mail: engimplan@engimplan.com.br
Rodovia Washington Luís, Km 172, Pista Sul, S/N,
Condomínio Compark, Rua 6 – Jardim Anhanguera – CEP:
13501-600 – Rio Claro-SP.
Horário de Atendimento: 07h30 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Instruções de Uso disponíveis em:
www.engimplan.com.br

Versão: 0000
Emissão: XX/XX/XXXX

5.3 Reclamação

Caso o produto apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Engimplan. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600.

A Engimplan disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (19) 3522 7407 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Engimplan Engenharia de Implante Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600

Telefone: (19) 3522 7407

Responsável Técnico: Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Bruno de Castro Ferreira Barreto
Representante Legal

Engº Rosana Maria Moreira Santos
Responsável Técnico.
CREA-SP 5062668661