



## INSTRUÇÕES DE USO

**NOME TÉCNICO:** Não Aplicável

**NOME COMERCIAL:** Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

**Fabricante:**

ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407









Email: [sac@materialise.com](mailto:sac@materialise.com)

**Responsável Técnico:** Eng<sup>o</sup>. Marcelo Scavitti CREA-SP 0685109896

**NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº:** Não Aplicável

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL  
ESTERILIZAR ANTES DO USO**

### LEGENDA DOS SÍMBOLOS DA EMBALAGEM

 REF	Código do produto		Evitar exposição direta à luz solar
 LOT	Número de lote		Manter protegido de umidade
	Consulte Instruções de Uso		Cuidado - Frágil
	Não Estéril		Não utilizar se a embalagem estiver violada
	País e Data de fabricação		Data de validade
	Nome do fabricante		

#### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Não Aplicável

**Nome Comercial:** Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

**Composto por:** Caixas em Polímero

**Matéria Prima:** Polifenilsulfona, Ultem HU1004, Aço Inox, Borracha Vulcanizada, Silicone e Alumínio.

**Produto Não Estéril**

**Método de Esterilização:** Autoclave a vapor

#### 1. Descrição do Produto Médico


As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são embaladas individualmente em embalagem plástica devidamente rotulada. A embalagem é fabricada em polietileno de baixa densidade.


As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

### 1.1. Apresentação Comercial

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan apresentam-se nos seguintes modelos para que o cirurgião faça sua escolha:

Tabela: Apresentação das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan

	DESCRIÇÃO	IMAGEM
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.1 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.2 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.1 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.2 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 001.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.1 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.2 CAIXA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002.3	
110.000XX	CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.1 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.2 CAIXA BUCOPLAN 2,4 MOD. 002.3	
110.003XX	CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 001 CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 002 CAIXA KIT ORTODÔNTICO MOD. 003	
110.000XX	CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 001 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 002 CAIXA PARA CONJUNTO CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 003	

110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO CAGE TORACO LOMBAR CÔNICO MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA CERVICAL MOD. 003</p>	
110.003XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO ATML MOD. 003</p>	
110.003XX	<p>CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 001</p> <p>CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 002</p> <p>CAIXA KIT PROTÉTICO MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO GAIOLA TORACO LOMBAR MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 001</p> <p>CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 002</p> <p>CAIXA CONJUNTO PARA CIRURGIA COM PLACA CONJUGADA MOD. 003</p>	
110.000XX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA TÓRACO LOMBAR MOD. 003</p>	

INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN


110.000XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 003</p>
110.00076	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN EASY SYTEM MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DUOPLAN PLUS MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DUOPLAN PLUS MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA POSTPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA POSTPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA POSTPLAN MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA ZARGON PLUS MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA ENDOBOTTON MOD. 001</p> <p>CAIXA ENDOBOTTON MOD. 002</p> <p>CAIXA ENDOBOTTON MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA HEBERT MOD. 001</p> <p>CAIXA HEBERT MOD. 002</p> <p>CAIXA HEBERT MOD. 003</p>
110.000XX	<p>CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA LIGAMENTO LCA / LCP MOD. 003</p>



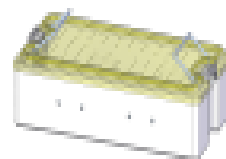
INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

110.000XX	CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 001 CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 002 CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO - SISTEMA 2,0 MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 001 CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 002 CAIXA PARA SISTEMA PUNHO MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 001 CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 002 CAIXA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 003
110.00XXX	CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 001 CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 002 CAIXA PARA GRANDES FRAGMENTOS IMPLANTES / INSTRUMENTAIS MOD. 003
110.00XXX	CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 001 CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 002 CAIXA ESTERNO IMPLANTES E INSTRUMENTAIS MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 001 CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 002 CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES DPA MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 001 CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 002 CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS DPA MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 001 CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 002 CAIXA Nº 1 INSTRUMENTAIS OCCIPITO CERVICAL MOD. 003
110.00XXX	CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 001 CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 002 CAIXA Nº 2 INSTRUMENTAIS / IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL MOD. 003



110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO EASY SYTEM COMPACTA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ ANCORA ARPÃO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CANUL 7,0 - PUDDU MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CANULADO 7,0 / 4,5 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONDIPLAN MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ DHS MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ DHS MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ DHS MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ FIXADOR DINART 200 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ HASTE BLOQ. FEMUR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ INTERFERÊNCIA LCA MOD. 003</p>	


110.00XXX	<p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR – IMPLANTES MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ PEDICULAR INSTRUMENTAL MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 001</p> <p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 002</p> <p>CAIXA PLACA CALÇO P/ TÍBIA MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ TÓRACO LOMBAR MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR RETO MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR ANGULADO MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA SPINE SCREW CERVICAL MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA SPINE SCREW LOMBAR MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 001</p> <p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 002</p> <p>CAIXA INTER ESPINHOSO MOD. 003</p>





110.00XXX	<p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 001</p> <p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 002</p> <p>CAIXA KIT PARA ENXERTO MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA SISTEMA ANCORA ROSQUEADA MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PUNHO MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA HASTE DE TÍBIA MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONDIPLAN MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FIXADOR MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PLIF - EN MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CAN CORTICAL MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA PEDICULAR MOD. 003</p>




110.00XXX	<p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 2,8 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 3,6 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 4,1 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA CANULADO 5,5 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR POSTERIOR MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE TÓRACO LOMBAR MODULAR ANTERIOR MOD. 003</p>	

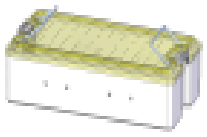
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE PLACA CONJUGADA MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE CUNHA CERVICAL MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 001</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 002</p> <p>CAIXA PARA CONJUNTO DE CAGE INTER ESPINHOSO MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 1 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 2 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 3 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 001</p> <p>CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 002</p> <p>CAIXA Nº 4 DE INSTRUMENTAIS AUXILIARES MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 560 X 290 X 60 MM. MOD. 003</p>
110.00XXX	<p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 270 X 270 MM. MOD. 003</p>




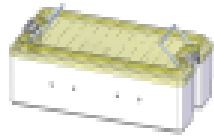
INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

110.00XXX	<p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 450 X 260 X 60 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA ESPECIAL 400 X 100 X 100 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 360 X 360 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 290 X 590 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 480 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL MEIA LUA MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 60 X 270 X 310 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 170 X 265 X 550 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL LOMBAR MOD. 003</p>	

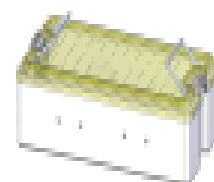
INSTRUÇÃO DE USO  
CAIXAS CIRURGICAS EM POLÍMERO ENGIMPLAN

110.00XXX	<p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 001</p> <p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 002</p> <p>CAIXA 120 X 265 X 550 MM. MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 001</p> <p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 002</p> <p>CAIXA INOX P/ CONJUNTO CAGE PEEK CERVICAL MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 001</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 002</p> <p>CAIXA P/ CONJUNTO PEEK CERVICAL BLOQUEADO MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,0 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA LOCKING 2,4 MOD. 003</p>	
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 1,5 MOD. 003</p>	
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA IMPLANTES SISTEMA BUCOPLAN 2,0 MOD. 003</p>	
112.00XXX	<p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 001</p> <p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 002</p> <p>ESTOJO PARA INSTRUMENTAIS SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0 MOD. 003</p>	
110.00XXX	<p>CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 001</p> <p>CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 002</p> <p>CAIXA SISTEMA BUCOPLAN MOD. 003</p>	

110.00XXX	<p>CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 001</p> <p>CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 002</p> <p>CAIXA KIT COMFORT SCREW PLUS MOD. 003</p>	
110.110XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25</p>	

110.110XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA GAIOLA MODELO 10</p>	
110.110XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PLACAS – MODELO 10</p>	
110.110XX	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3</p>	

	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23	
	CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24	





	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 26</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 27</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 28</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 29</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 30</p>	
<p>110.111XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10</p>	
<p>110.111XX</p>	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 10</p>	

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 11

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 12

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 13

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 14

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 15

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 16

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 17

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 18

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 19

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 20

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 21

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 22

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 23

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 24

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 25

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 26

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 27

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 28

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 29

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 30

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 31

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 32

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 33

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 34

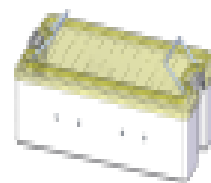
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 35

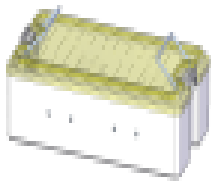
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 36

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 37

CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 38

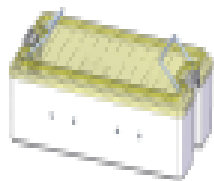
CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 39

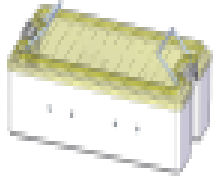


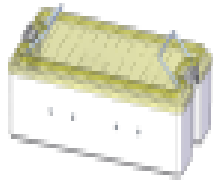
	<p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 40</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 41</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 42</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 43</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 44</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 45</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 46</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 47</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 48</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 49</p> <p>CAIXA PARA IMPLANTES DE BUCOMAXILO – MODELO 50</p>	
<p>110.112XX</p>	<p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 1</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 2</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 3</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 4</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 5</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 6</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 7</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 8</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 9</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 10</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 11</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 12</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 13</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 14</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 15</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 16</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 17</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 18</p> <p>CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 19</p>	

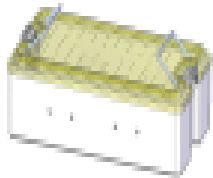
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 20  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 21  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 22  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 23  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 24  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 25  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 26  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 27  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 28  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 29  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 30  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 31  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 32  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 33  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 34  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 35  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 36  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 37  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 38  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 39  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 40  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 41  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 42  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 43  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 44  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 45  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 46  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 47  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 48  
CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 49



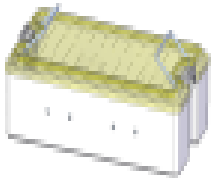
	CAIXA DE IMPLANTES PARA TRAUMA – MODELO 50	
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA CAGE EM PEEK MODELO 25</p>	
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 3</p>	

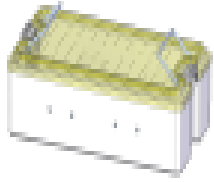
	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA GAIOLA MODELO 10</p>	
110.125XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PLACAS – MODELO 10</p>	
110.126XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 8</p>	

	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 21</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA PARAFUSO PEDICULAR – MODELO 25</p>	
110.126XX	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 4</p>	

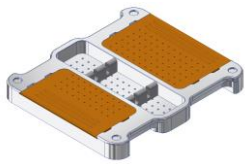
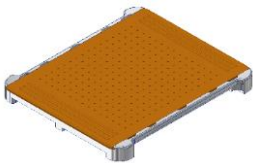
	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE COLUNA OCCIPITO CERVICAL – MODELO 10</p>	
<p>110.12XXX</p>	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 1</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 2</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 3</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 4</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 5</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 6</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 7</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 8</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 9</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 10</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 11</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 12</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 13</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 14</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 15</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 16</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 17</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 18</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 19</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 20</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 21</p>	



	<p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 22</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 23</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 24</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 25</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 26</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 27</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 28</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 29</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 30</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 31</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 32</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 33</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 34</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 35</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 36</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 37</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 38</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 39</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 40</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 41</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 42</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 43</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 44</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 45</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 46</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 47</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 48</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 49</p> <p>CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE BUCOMAXILO – MODELO 50</p>	
--	---	--

110.12XXX	CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 1 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 2 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 3 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 4 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 5 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 6 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 7 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 8 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 9 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 10 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 11 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 12 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 13 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 14 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 15 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 16 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 17 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 18 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 19 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 20 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 21 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 22 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 23 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 24 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 25 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 26 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 27 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 28 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 29 CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 30	
-----------	---	---

	<p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 31</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 32</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 33</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 34</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 35</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 36</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 37</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 38</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 39</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 40</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 41</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 42</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 43</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 44</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 45</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 46</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 47</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 48</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 49</p> <p>CAIXA DE INSTRUMENTAIS PARA TRAUMA – MODELO 50</p>	
<p>112.00030</p>	<p>ESTOJO PARA BUCOMAXILO MOD.01</p>	

112.00031	ESTOJO PARA BUCOMAXILO MOD.02	
112.00032	ESTOJO PARA BUCOMAXILO MOD.03	

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

A seleção do modelo comercial das caixas é de responsabilidade exclusiva do cirurgião, não cabendo ao Fabricante a responsabilidade por essas escolhas.

## 2. Composição

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan possuem as seguintes matérias-primas: Polifenilsulfona, Ultem HU1004, Aço Inox, Borracha Vulcanizada, Silicone e Alumínio.

## 3. Indicações e Finalidade

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são indicadas para transporte, armazenamento e esterilização de instrumentais e implantes.

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan foram especialmente projetadas para acomodação de instrumentais e implantes cirúrgicos, nos procedimentos de esterilização, armazenamento e transporte do mesmo. Apresentam extensa superfície perfurada o que proporciona um fluxo maior do agente esterilizante no interior da caixa, acelerando o seu contato com o instrumental e/ou implante, o que resulta em um ciclo de esterilização bem sucedido.

### 3.1. Contraindicação

Não se aplica.

## 4. Forma de Apresentação da embalagem

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são comercializadas **UNITARIAMENTE** em embalagem plástica. As embalagens plásticas são identificadas com uma etiqueta contendo as

seguintes informações:

1. Nome Técnico: Não Aplicável
2. Nome Comercial;
3. Produto/Dimensões;
4. Código;
5. Quantidade;
6. Fabricação;
7. Lote;
8. Material;
9. Validade;
10. Registro ANVISA: Não Aplicável
11. Revisão Instrução de Uso:
12. Produto Dispensado de Registro junto a Anvisa conforme Nota Técnica Anvisa Nº218/20
13. Responsável Técnico;
14. Dados do Fabricante;
15. Código de barra

### Modelo de Rotulagem

 **engimplan**

ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.  
Rod. Washington Luiz, Km 172, Pista Sul, S/N, Condomínio Copacabana Park, Rua 6 – Jardim Anhanguera – CEP: 13501-600 – Rio Claro - SP  
CNPJ: 67.710.244/0001-39  
Responsável Técnico: Eng. Marcelo Scavitti CREA-SP 0685109896

**REF** XXXXXX **LOT** XXXXXX **Quantidade:** XX

**Modelo Comercial:**  
**Modelo Comercial:**  
**Commercial Model:**

**Notificação Anvisa:** Não Aplicável  
**Produto dispensado de registro junto a Anvisa conforme Nota Técnica Anvisa Nº218/20.**  
**Revisão Instrução de Uso:** XX  
**Nome Técnico:** Não Aplicável  
**Nome Comercial:**  
**Matéria-Prima:**

 XX/XX/XXXX  Indeterminada

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva.

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO**

“CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO: VIDE INSTRUÇÕES DE USO”  
Instrução de Uso disponível em / Instrucción de Uso disponible en / Instruction for Use available at: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

\*Instruções de Uso em formato impresso devem ser solicitadas, sem custo adicional, através do SAC pelo telefone 19 3522-7407.\*





FABRICANTE: ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP:13501-600

CNPJ: 67.710.244/0001-39

Telefone: (19) 3522 7407

E os dizeres:

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO**

“CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO:  
VIDE INSTRUÇÕES DE USO”.

Armazenar em local fresco e seco, fora da ação direto de calor, umidade ou luz excessiva.

Instrução de Uso disponível em: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

Instruções de Uso em formato impresso devem ser solicitadas, sem custo adicional, através do SAC pelo telefone 19 3522-7407.

Visando a praticidade e facilidade de ter acesso às Instruções de Uso dos produtos, e atender a IN nº 4/2012, a Materialise Brazil disponibiliza o documento vigente através do endereço: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>

Para visualização dos arquivos, utilize o software Adobe Reader.

As instruções de uso dos produtos Materialise Brazil estão indexadas no site através do nº Registro/Notificação Anvisa e respectivo Nome Comercial, data e a revisão da instrução de uso do produto adquirido.

Todas as Instruções de Uso dos produtos Materialise Brazil possuem a identificação e a data da revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão e data de revisão) da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.

Para Instruções de Uso no formato impresso, ou solicitar outros arquivos de revisões anteriores às atuais, o consumidor pode solicitar sem custo adicional através do SAC pelo telefone 19 3522-7407 ou Email: [sac@materialise.com.br](mailto:sac@materialise.com.br).”

**4.1. Cuidados com Manuseio, Armazenamento e Transporte do Produto Médico**

- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz;
- Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referenciais do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos;

- Devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características;
- Devem ser manipulados cuidadosamente evitando-se batidas ou quedas;
- Qualquer caixa que tenha caído ou sido inadequadamente manuseada, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separada e encaminhada ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

#### **4.2 Limpeza**

Os instrumentais devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% +- água destilada 30%. Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

**IMPORTANTE:** Detergentes com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

#### **4.3 Risco de Contaminação**

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan podem apresentar riscos de contaminação e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, as caixas após cada uso devem ser limpas corretamente, a fim de evitar incrustações e corrosões nas caixas. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer as caixas. As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser esterilizadas antes do uso.

#### **4.4 Esterilização**

As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan são fornecidas não estéreis, devendo ser esterilizadas antes da sua utilização.

A Materialise Brazil recomenda que os produtos sejam submetidos à esterilização por calor úmido em autoclave com os seguintes parâmetros:

- TEMPERATURA: 134°C à 137°C
- TEMPO: 4 Minutos
- TEMPO DE SECAGEM: 30 minutos

Os parâmetros acima foram validados conforme ABNT NBR ISO 17665-1 e ABNT NBR ISO/TS 17665-2.

É de responsabilidade da instituição hospitalar garantir a esterilização conforme regulamentação vigente.

#### **4.5 Descarte**

Quando da necessidade de se descartar as caixas, a mesma deve ser descaracterizada

imediatamente de forma a evitar que seja utilizada inadvertidamente, recomendamos que sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização.

O descarte das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Deve a Instituição hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislação vigente aplica.

#### **4.6 Eventos Adversos**

Caso ocorra algum evento adverso relacionado ao produto, deverá ser notificado o fabricante através do telefone (19) 3522 7407 e notificar o órgão sanitário competente, acessando o site da ANVISA – <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes>

### **5 Precauções e Advertências**

- Esterilizar o produto antes do uso;
- Em caso de queda ou acidente que comprometa as características do produto, o mesmo não deverá ser utilizado;
- Nunca utilize caixas danificadas;
- Antes de utilizar as caixas, siga as instruções de limpeza, descontaminação e esterilização;
- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan devem ser mantidas em suas embalagens originais até a sua limpeza, descontaminação, esterilização e uso;
- Após cada uso, realizar uma limpeza correta;
- Verificar a cada uso, se as Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan não sofreram nenhum dano;
- As Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan somente devem ser usadas para a finalidade que foram desenvolvidas, não utilize-as para outros fins diferentes daqueles descritos.

#### **5.1 Rastreabilidade**

A rastreabilidade das Caixas Cirúrgicas em Polímero Engimplan é garantida através de marcação a laser do logo do fabricante (Materialise Brazil), número do código e do número de lote no produto

#### **5.2 Reclamação**

Caso o produto apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a



Materialise Brazil. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP - CEP: 13501-600.

A Materialise Brazil disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (19) 3522 7407 para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Engimplan Engenharia de Implante Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Washington Luiz, S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP -CEP: 13501-600

Telefone: (19) 3522 7407

Email: [sac@materialise.com](mailto:sac@materialise.com)

**Responsável Técnico:** Eng<sup>o</sup>. Marcelo Scavitti CREA-SP 0685109896